

## メディジェクトK[ハードキャップタイプ(PF-20K1MH)]の紹介

平成 15 年 3 月より、プレフィルド型高濃度カリウム製剤「メディジェクトK (テルモ)」が専用針のみしか接続できない方式となりました。誤って三方活栓から急速静注することはないと思います (フルプルーフ)。専用針を用いてボトルに混注することになります。



メディジェクトKと専用針



三方活栓には接続できない



操作法 1 : 専用針をボトルに刺入

操作法 2 : 専用針に接続